



1. Approvisionnement en consommables pour le prélèvement

Le laboratoire gère le stock de matériel de prélèvement (tubes, récipients, écouvillons).

Les unités de soins passent leur commande régulièrement au laboratoire pour avoir un stock suffisant dans la dotation de soins des services.

La commande se fait par mail :

Remplir le fichier Excel « Commande des tubes au laboratoire »

Envoyer le fichier complété à labo.stock@ch-beziers.fr

Les livraisons des tubes se font les mardis et vendredi de 14h à 15h.

2. Gestion du stock dans les services de soins

Le « stock utilisateur » est alors géré par le personnel du service de soins qui doit respecter les conditions de stockage et contrôler les dates de péremption.

Pour cela, il est conseillé de stocker les tubes verticalement sur leur support plastique et de faire un roulement.

3. Conditions de stockage

Entre **4 et 25°C** pour les tubes de prélèvement, le flaconnage et les écouvillons.

Tenir les tubes de prélèvement verticalement, à l'abri de la chaleur.

Entre **2 et 8°C** pour les milieux de transport spécifiques (chlamydiae, herpès, mycoplasmes).